


ceraMotion® One Touch Concept.



Foto: © Christian Ferrari®

Il ceraMotion® One Touch Concept unisce due importanti brand: Nacera® e ceraMotion®.

Due importanti brand come **Nacera®** e **ceraMotion®** sono stati uniti per offrire un insieme di prodotti unico nel suo genere, indicato per la realizzazione e la finalizzazione di strutture monolitiche in zirconia ad elevato valore estetico. Tali materiali sono stati adattati individualmente uno sull'altro per incontrare al meglio le esigenze e le richieste della moderna odontotecnica.

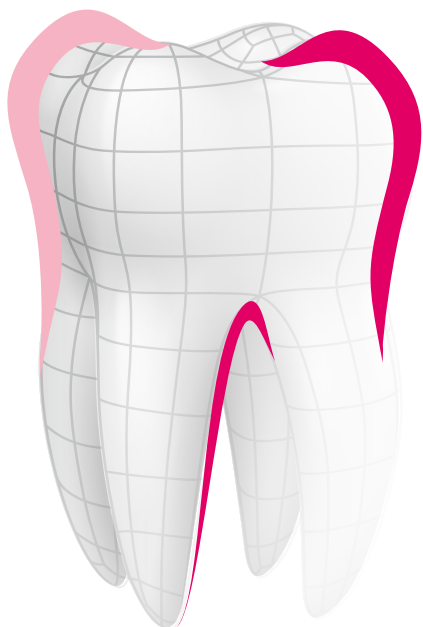


Nacera®, la collaudata ceramica di ossido di zirconio dalle elevate prestazioni, offre numerose indicazioni d'impiego. Questi blanks di qualità da fresaggio sono prodotti in Germania e permettono la realizzazione di riabilitazioni protesiche dall'aspetto particolarmente naturale.

ceraMotion®

La ceramica **ceraMotion® Zr** combina emozionalità con progresso tecnologico in un sistema concepito secondo logica e funzionalità. Tutti i prodotti che ne fanno parte, sono stati sviluppati e prodotti da Dentaureum Ceramics, una società del Gruppo Dentaureum. Il One Touch Concept unisce due importanti brand – **Nacera®** e **ceraMotion®**.

* Nacera® è un marchio registrato di DOCERAM Medical Ceramics GmbH.

Ossido di zirconio. Sicurezza cromatica. Estetica.

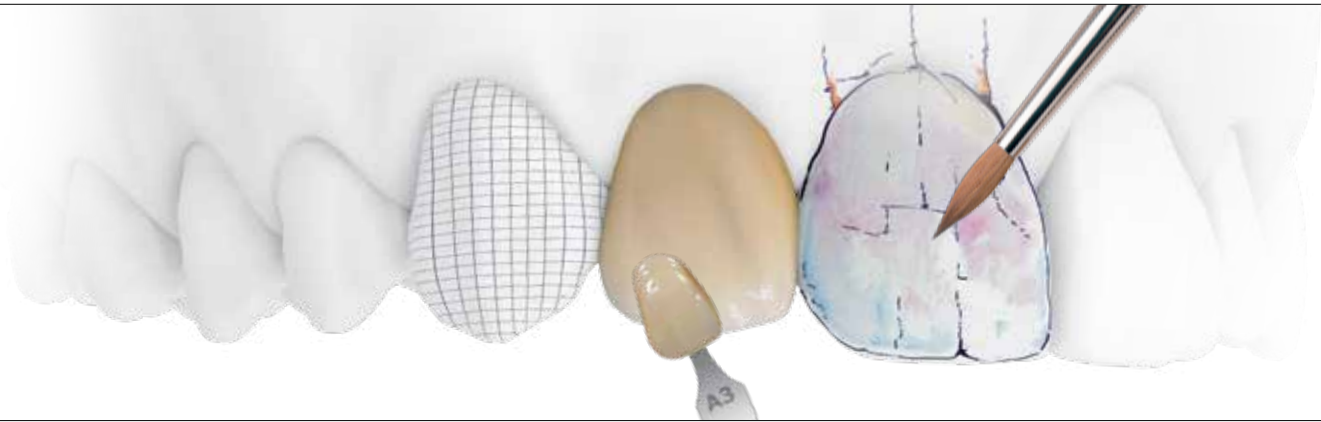

- ✓ Zirconia ad elevata traslucenza, precolorata nei colori classici V (A1 - D4 + 2 tonalità bleach).
- ✓ Un concetto di ceramica per la stratificazione, il cut-back, la tecnica di pittura e la minima stratificazione.
- ✓ Paste 2D e 3D uniche nel loro genere per la rapida ed estetica finalizzazione di riabilitazioni anatomiche.
- ✓ Liquidi per infiltrare la zirconia presinterizzata nei colori classici V (A1 - D4) e nelle tinte effetto da pittura e immersione.

Il ceraMotion® One Touch Concept.



La richiesta di riabilitazioni in ceramica integrale è in costante aumento. La realizzazione di ponti e corone con questo materiale non assicura solo una maggiore tenuta nel tempo, ma anche un aspetto più naturale, una grande stabilità chimica e una buona compatibilità. Offre, quindi, tutto ciò che oggi ci si aspetta da una moderna riabilitazione protesica.

Ma è in costante crescita anche la domanda di materiali che permettano un risparmio di tempo nella lavorazione, senza compromettere elevati standard di estetica.

La nostra risposta è il ceraMotion® One Touch Concept.

Le paste **ceraMotion® One Touch** sono state sviluppate in modo specifico per le riabilitazioni in ceramica integrale. Assieme ai blanks **Nacera® Pearl Shaded 16 + 2** formano i prodotti di base del **ceraMotion® One Touch Concept**. Non è mai stato tanto semplice realizzare corone e ponti estetici in così poco tempo!

✓ Semplice ✓ Rapido ✓ Estetico



Nacera® Pearl Shaded 16 + 2

Blanks in ossido di zirconio ad elevata traslucenza e precolorato nei 16 colori classici più due tonalità bleach. La finalizzazione con tecnica di pittura e di glasura o ricorrendo a metodi di minima stratificazione dei blanks **Nacera® Pearl Shaded**, offre sorprendenti e affidabili risultati estetici delle strutture monolitiche.



Paste ceraMotion® One Touch

Le **ceraMotion® One Touch** sono paste 2D e 3D appositamente sviluppate per la finalizzazione e la caratterizzazione di strutture monolitiche in ceramica integrale in ossido di zirconio e disilicato di litio.

Il portafoglio prodotti.


Nacera® Pearl Shaded 16 + 2		Zirconia a elevata traslucenza, precolorata (16 colori classici + 2 tonalità bleach)
Nacera® Classic Liquids		Liquidi per l'infiltrazione della zirconia bianca
Nacera® Blue X		Liquido per aumentare la traslucenza della zirconia
Nacera® Clean		Cleaning powder per forni di sinterizzazione: per eccellenti risultati di sintering
ceraMotion® One Touch		Paste 2D e 3D per la rapida e semplice finalizzazione estetica
ceraMotion® Zr		Moderna ceramica per ossido di zirconio e disilicato di litio
ceraMotion® Stains Universal		Colori per la realizzazione di effetti interni ed esterni

Tutte le possibilità per ottenere una bella corona.



Nella tabella sono elencati tutti i possibili utilizzi del ceraMotion® One Touch Concept.

	Stratificazione	Cut-back	Stratificazione minimale	Pittura	Immersione/ a pennello
Nacera® Pearl Shaded 16 + 2 (precolorati, a elevata traslucenza)	✓	✓	✓	✓	—
Zirconia multicromatica (a transizione di colore, traslucida)	✓	✓	✓	✓	—
Zirconia bianca (traslucida)	✓	✓	✓ (opzionale)	✓ (opzionale)	✓
Zirconia bianca (opaca)	✓	✓	—	—	✓
Nacera® Classic Liquids	✓	✓	✓	✓	✓
ceraMotion® One Touch (paste 2D e 3D)	—	—	✓	✓	✓
ceraMotion® Zr	✓	✓	—	—	✓
ceraMotion® Stains universali	✓	✓	✓	✓	✓

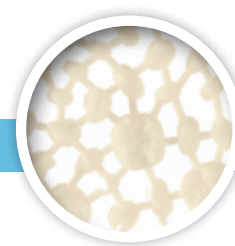

Blanks di ossido di zirconio ad elevata traslucenza, precolorati nei 16 colori classici V e due tonalità bleach. La finalizzazione con tecnica di pittura e di glasura o ricorrendo a metodi di minima stratificazione dei blanks **Nacera® Pearl**, offre sorprendenti e affidabili risultati estetici delle strutture monolitiche.

I blanks **Nacera® Pearl Shaded** sono disponibili da subito nei 16 + 2 colori di nuovo sviluppo analogamente al sistema classico V e rappresentano la base ideale per strutture ridotte con minima stratificazione. Grazie alla loro fedeltà cromatica e all'esiguo impegno per la personalizzazione del lavoro, permettono di ottenere risultati altamente estetici.

Vantaggi & indicazioni

- ✓ Grande resistenza e contemporanea elevata traslucenza per ogni esigenza a 1400 MPa.
- ✓ Sicurezza cromatica e di processo grazie all'infiltrazione omogenea del colore per garantire risultati costanti.
- ✓ Economicità grazie all'eliminazione del processo d'immersione e all'uso dei liquidi d'infiltrazione.
- ✓ Eccellente fresabilità senza fratture marginali o distacchi.
- ✓ Assicura riabilitazioni monolitiche dall'aspetto estetico e naturale.
- ✓ Perfezione cromatica analoga al sistema di colori classici V.




Nacera® Pearl Shaded 16 + 2, Ø 98,3 mm


	12 mm	14 mm	16 mm	18 mm	20 mm	25 mm
OM 2	270-009-12	270-009-14	270-009-16	270-009-18	270-009-20	270-009-25
OM 3	270-010-12	270-010-14	270-010-16	270-010-18	270-010-20	270-010-25
A 1	270-011-12	270-011-14	270-011-16	270-011-18	270-011-20	270-011-25
A 2	270-012-12	270-012-14	270-012-16	270-012-18	270-012-20	270-012-25
A 3	270-013-12	270-013-14	270-013-16	270-013-18	270-013-20	270-013-25
A 3,5	270-014-12	270-014-14	270-014-16	270-014-18	270-014-20	270-014-25
A 4	270-015-12	270-015-14	270-015-16	270-015-18	270-015-20	270-015-25
B 1	270-021-12	270-021-14	270-021-16	270-021-18	270-021-20	270-021-25
B 2	270-022-12	270-022-14	270-022-16	270-022-18	270-022-20	270-022-25
B 3	270-023-12	270-023-14	270-023-16	270-023-18	270-023-20	270-023-25
B 4	270-024-12	270-024-14	270-024-16	270-024-18	270-024-20	270-024-25
C 1	270-031-12	270-031-14	270-031-16	270-031-18	270-031-20	270-031-25
C 2	270-032-12	270-032-14	270-032-16	270-032-18	270-032-20	270-032-25
C 3	270-033-12	270-033-14	270-033-16	270-033-18	270-033-20	270-033-25
C 4	270-034-12	270-034-14	270-034-16	270-034-18	270-034-20	270-034-25
D 2	270-042-12	270-042-14	270-042-16	270-042-18	270-042-20	270-042-25
D 3	270-043-12	270-043-14	270-043-16	270-043-18	270-043-20	270-043-25
D 4	270-044-12	270-044-14	270-044-16	270-044-18	270-044-20	270-044-25

Dati tecnici*

Materiale	ZrO ₂ 3Y-TZP
Colore	Shaded, elevata traslucenza
Densità	> 6,04 g/cm ³
Resistenza alla flessione (biassiale)	1400 MPa
Resistenza alla compressione	3000 MPa
Modulo di elasticità E	205 GPa
Resilienza	8 MPa m ^{1/2}
Durezza	1300 HV 0,5
CET	10 x 10 ⁻⁶ K ⁻¹
Conducibilità termica	2 W/mK
Granulometria media	< 0,4 µm
Radioattività	< 0,02 Bq/g
Solubilità	< 10 µg/cm ²
Composizione chimica	ZrO ₂ + HfO ₂ + Y ₂ O ₃ > 99%, Y ₂ O ₃ 4,5% -6%

**I valori sono stati misurati su provini e sono tipici del materiale. Tuttavia, tali valori possono variare in funzione della geometria e del tipo di protesi, nonché del processo di lavorazione adottato.*

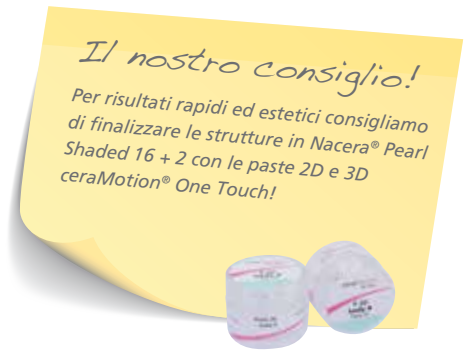

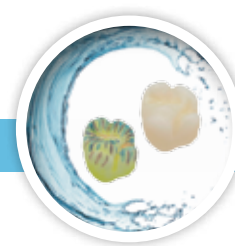

Nacera® Classic Liquids – un concetto di colori completamente nuovo per risultati cromatici perfetti e naturali.

L'attenzione sull'essenziale – I **Nacera® Classic Liquids** sono disponibili nei 16 colori classici V e nelle diverse tinte effetto, per una lavorazione flessibile e individuale del restauro in zirconia. Raffinati dettagli, come i mammelloni e i bordi cervicali/interprossimali, possono essere realizzati con facilità e precisione millimetrica.

I liquidi vengono applicati direttamente con il pennello o trasferiti alla zirconia tramite tecnica a immersione. Con i liquidi effetto incisali è anche possibile la combinazione di entrambe le metodiche. Analogamente, anche la zirconia precolorata può essere individualizzata. I **Nacera® Classic Liquids** sono stati sviluppati in abbinamento alla zirconia **Nacera® Pearl**, per assicurare la massima sicurezza cromatica, estetica ed efficienza. Sono tuttavia compatibili anche con altri tipi di zirconia a uso dentale.



Nacera® Classic Liquids	50 ml	100 ml
Body A 1	271-011-50 *	271-011-00
Body A 2	271-012-50 *	271-012-00
Body A 3	271-013-50 *	271-013-00
Body A 3,5	271-014-50 *	271-014-00
Body A 4	271-015-50 *	271-015-00
Body B 1	271-021-50 *	271-021-00
Body B 2	271-022-50 *	271-022-00
Body B 3	271-023-50 *	271-023-00
Body B 4	271-024-50 *	271-024-00
Body C 1	271-031-50 *	271-031-00
Body C 2	271-032-50 *	271-032-00
Body C 3	271-033-50 *	271-033-00
Body C 4	271-034-50 *	271-034-00
Body D 2	271-042-50 *	271-042-00
Body D 3	271-043-50 *	271-043-00
Body D 4	271-044-50 *	271-044-00
Diluyente	271-050-50 *	—

Nacera® Classic Liquids Set

Completo (i prodotti contenuti sono quelli con *)	271-100-00
---	------------

Nacera® Classic Liquids	20 ml
Enamel I	271-051-20 *
Enamel II	271-052-20 *
Effect Blue	271-061-20 *
Effect Grey	271-065-20 *
Effect Violet	271-066-20 *
Effect Brown	271-071-20 *
Balancer	271-074-20 *
Effect Orange	271-075-20 *

Nacera® Classic Liquids - Accessori

Brush I, Kolinsky-M, 1 pezzo	271-101-00 *
Brush II, Kolinsky-S, 1 pezzo	271-102-00 *
Nacera® Pipette, 1 pezzo	271-103-00 *
Nacera® Funnel, 1 pezzo	271-104-00 *
Nacera® Chrono, 1 pezzo	271-105-00 *
Nacera® Diver, 1 pezzo	271-106-00
Nacera® Tweezer, 1 pezzo	271-107-00 *
Nacera® Classic Liquid Organizer	271-110-00 *

Nacera® Blue X Translucent Liquid



Uno dei desideri più frequenti è poter disporre di una zirconia "ultra-traslucente", che abbia cioè le stesse caratteristiche estetiche del disilicato di litio.

Con il Nacera® Blue X Translucent Liquid ciò è possibile. Applicato sulla zirconia, il Nacera® Blue X Translucent Liquid ne aumenta la traslucenza fino all'8% in modo controllato e individuale, solo dove lo si desidera. Sulla zirconia precolorata Nacera® il Nacera® Blue X Translucent Liquid riduce il croma nell'area in cui lo stesso viene applicato. Se utilizzato sulle cuspidi o sui bordi incisali, produce una naturale sfumatura della zirconia precolorata in maniera simile all'effetto di una multicromatica.

- ✓ **individuale:** aumenta la traslucenza in maniera controllata e puntiforme.
- ✓ **flessibile:** in ambito anteriore, dei bordi incisali – da applicare dove si desidera.
- ✓ **efficiente:** non è più necessario l'utilizzo di zirconia UHT.
- ✓ **indicazione:** frontali e laterali, ponti fino a 3 elementi.
- ✓ **nessuna riduzione della resistenza:** 1400 MPa, quindi 2 volte più resistente della zirconia cubica e 4 volte più resistente del silicato di litio.

Nacera® Blue X


Set

271-090-00

(15 ml Nacera® Blue X liquido, pennello e ciotola di miscelazione in vetro)



Nacera® Clean Cleaning powder

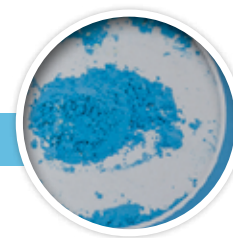

I liquidi d'infiltrazione e le impurità attaccate alle resistenze dei forni possono causare spiacevoli effetti di decolorazione e di contaminazione della zirconia durante la sinterizzazione. Già con il suo primo utilizzo, Nacera® Clean attira le impurità presenti nell'atmosfera della camera e le intrappola, pulendo così il forno. Si ritorna quindi a ottenere risultati di sinterizzazione di colore omogeneo e traslucido. L'uso regolare del Nacera® Clean, assicura l'assenza di nuove impurità nella camera di cottura.

- ✓ **Non più strutture sinterizzate con colorazione giallo-verde.**
- ✓ **Non più particelle estranee incluse nella superficie della zirconia.**
- ✓ **Pulisce definitivamente la camera del forno dai residui dei liquidi d'infiltrazione.**
- ✓ **Fornisce ancora una volta risultati di sinterizzazione affidabili e traslucidi.**

Per la pulizia di base del forno consigliamo lo Starter Kit contenente 200 g di polvere.

La regolare pulizia viene effettuata con unità di manutenzione da 30 g cad.

Nacera® Clean

Starter Kit 1 x 200 g	271-120-00
Maintain 9 x 30 g	271-121-00
Bundle 1 x 200 g + 4 x 30 g	271-122-00



ceraMotion® One Touch



Il cofano **ceraMotion® One Touch** contiene 16 masse singole nonché i liquidi speciali e gli accessori occorrenti.

I prodotti chiave sono le masse in pasta 2D e 3D che possiedono grande precisione cromatica. Sono state progettate per restauri in ceramica integrale e restauri con un minimo cut-back. Sono compatibili con l'ossido di zirconio (ad es. **Nacera® Pearl Shaded 16 + 2**) e il disilicato di litio.

- ✓ Semplice e rapida gestione del lavoro grazie a paste ceramiche premiscelate e pronte all'uso.
- ✓ Cofano speciale per la semplice produzione di riabilitazioni protesiche estetiche in ceramica integrale.
- ✓ Massima estetica grazie alla precisione cromatica delle paste con effetto 3D.
- ✓ Possibili piccole correzioni di forma e fissaggio dei punti di contatto.

*Il cofano contiene tutti i singoli componenti ceraMotion® One Touch, con esclusione del solo supporto.
Tutti gli elementi del cofano sono disponibili anche singolarmente.*



Cofano ceraMotion® One Touch

Cofano	250-800-70
--------	------------

Paste ceraMotion® One Touch, 3 g

2D Body A	250-306-03
2D Body B	250-307-03
2D Body C	250-308-03
2D Body D	250-309-03
2D bianca	250-310-03
2D grigia	250-311-03
2D miele	250-312-03
2D blu	250-313-03
2D viola	250-314-03
3D I2	250-300-03
3D lumin	250-301-03
3D neutra	250-302-03
3D opal blu	250-303-03
3D opal grigia	250-304-03
3D opal miele	250-305-03

Liquidi ceraMotion® One Touch, 10 ml

Liquido per diluire	254-012-01
Liquido rigenerante	254-014-01

Glasura ceraMotion® Zr, 3 g

Pasta Glaze	250-271-03
-------------	------------

Pennelli ceraMotion® One Touch, 1 pezzo

Pennello 2D	260-905-20
Pennello 3D	260-906-20

Accessori ceraMotion® One Touch


Supporto (vuoto)	250-350-00
------------------	------------



Supporto con masse e accessori ceraMotion® One Touch (REF 250-350-00).



ceraMotion® Zr è la ceramica per ossido di zirconio e disilicato di litio. È parte del programma **ceraMotion®**, un sistema di ceramiche completo, sicuro e flessibile, creato da esperti ceramisti per ceramisti.

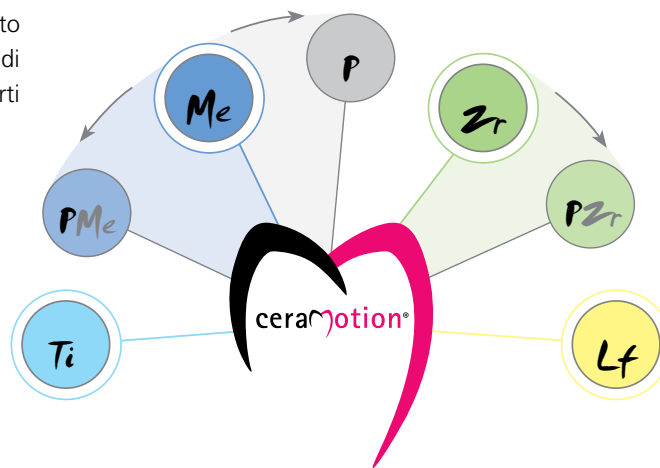

Da un punto di vista tecnico si hanno tutte le possibilità. Si potrà scegliere la stratificazione classica individuale, la tecnica del cut-back, la tecnica di pittura e la tecnica di stampaggio. A tal fine, il sistema ceraMotion® offre una vasta gamma di prodotti specifici.

ceraMotion® Zr – I vantaggi

- ✓ Grande sicurezza grazie all'elevata resistenza alla flessione: 115 MPa.
- ✓ Priva di feldspato e quindi di qualità costante e controllata.
- ✓ Bassa temperatura di cottura: 750 °C.
- ✓ Elevata vitalità cromatica anche dopo molteplici cotture.
- ✓ Superficie ceramica omogenea e brillante già dopo la prima cottura di dentina.
- ✓ Massima adesione alle superfici in ossido di zirconio grazie all'ideale impostazione del CET.
- ✓ Brevi cicli di cottura grazie alla bassa temperatura di trasformazione.
- ✓ Estetica naturale grazie alle speciali masse opalescenti, fluorescenti e traslucenti.





Cofani ceraMotion® Zr

Cofano 8 colori – REF 250-800-15

Ampio assortimento di masse nei colori A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, C3, D3 per tecnica di stratificazione individuale con molte masse incisali ed effetto.



Cofano Value Concept – REF 250-800-60

13 masse effetto (dentine e incisali) per la gestione individuale della luminosità e offrire il massimo risultato estetico di stratificazione.



Cofano Chroma Concept – REF 250-800-45

17 masse con opachi, dentine e bleach con le quali è possibile ottenere tutte le tonalità di colore (masse standard e bleach) delle chiavi cromatiche di altri sistemi (ad es. VITA System 3D-MASTER® o Ivoclar Chromascop).



Cofano Touch Up – REF 250-800-50

9 masse con dentine base, dentine e incisali per completare il lavoro o la sua correzione con facilità e con temperature di cottura più basse.



Cofano Stain universali – 250-800-30

16 colori da pittura per effetti interni ed esterni.



* VITA System 3D-Master è un marchio registrato di Vita Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG, 79704 Bad Säckingen, Deutschland

Corsi e Momenti ceraMotion®.

Il nostro più importante obiettivo è organizzare corsi in cui ciò che si impara possa essere subito messo in pratica dal partecipante.

L'estetica gioca un ruolo determinante soprattutto se si parla di ceramica dentale. Anche in questo campo Dentaaurum Accademy propone un team di esperti che sarà lieto di condividere con i colleghi le proprie conoscenze. Il sistema di ceramiche ceraMotion® verrà loro presentato attraverso un'ampia offerta di corsi pratici, propedeutici per mettere in luce le spiccate qualità estetiche delle nostre ceramiche.

Per valutarlo di persona non rimane che partecipare ad uno degli eventi organizzato con i nostri referenti: Odt. Germano Rossi, Odt. Roberto Ponchia, Odt. Enrico Cortesi.

Da non perdere anche le nostre serate ceraMotion® Lounges e i nostri Momenti ceraMotion®

Serate stimolanti in atmosfere rilassanti con oratori di fama e ceramisti esperti, per scambiare esperienze personali con ceraMotion® e confrontarsi sulla quotidianità del lavoro di laboratorio.

Questi sono gli obiettivi degli incontri che, tra uno stuzzichino e un buon aperitivo, organizzeremo in modo itinerante sul tema ceramica.



La nostra SEGRETERIA CORSI ➡ 051 861935

Fax: 051 8653827 | cdc@dentaaurum.it | www.dentaaurum.it

Il Gruppo Dentauro

Deutschland | Benelux | España | France | Italia | Switzerland | Australia | Canada | USA
oltre ad altri 130 paesi nel mondo.



DENTAURUM
QUALITY
WORLDWIDE
UNIQUE

- ➔ Per informazioni sui prodotti e servizi Dentauro, visitare il sito www.dentauro.com
- ➔ Ricordiamo anche il nostro ampio programma corsi. Per informazioni: 051 861935

Assistenza tecnica: 051 6647437 | E-Mail: ceramica@dentauro.it

Assistenza commerciale: 051 862580 | E-Mail: ordini@dentauro.it

Data dell'informazione: 09/16

Soggetto a variazione



www.dentauro.com

D
DENTAURUM
ITALIA

Dentauro Italia S.p.a. | Via degli Speciali, 142/144 | Centergross 40050 Fano (BO)
Telefono 051 862580 | Fax 051 863291 | www.dentauro.it | info@dentauro.it