

Für Ihre Fragen zur Verarbeitung unserer Produkte steht Ihnen unsere kieferorthopädische Anwendungsberatung gerne zur Verfügung.
Our orthodontic technicians are available to answer any questions you may have regarding our products:

Hotline Tel.-Nr. Festsitzende Technik +49 72 31/803-550
Fixed Appliance Technique Hotline

Hotline Tel.-Nr. Herausnehmbare Technik +49 72 31/803-555
Removable Appliance Technique Hotline

DE Gebührenfreie Fax-Nr. 0 800 / 4 14 24 34

Telefonische Auftragsannahme +49 72 31/803-210
Order Department

► Mehr Informationen zu Dentaurem Produkten finden Sie im Internet.
Additional information regarding Dentaurem products can be found on the internet.

DE Sie können unsere Produkte auch online bestellen unter:

AT

CH www.dentaurem.de

► Beachten Sie hierzu auch unser spezielles Kursangebot: Mehr Informationen unter unserer Hotline
*Also note our special course offers:
 Further information can be obtained by contacting our hotline:
 +49 72 31 / 803-470*

Stand der Information · *Date of information:* 05/07

Änderungen vorbehalten · *Subject to modifications*



BITE-BUMPER™*

Zur atraumatischen Bisspernung
Opens deep bite without trauma

989-633-60 Printed by Dentaurem Germany 05/07/CR1-2

Zertifiziert nach ISO 9001 and ISO 13485/CE
ISO 9001 and ISO 13485/CE certified

** registered trademark of Gestenco International AB*

Manufactured by:

Distributed by:

D
DENTAUREM

D
DENTAUREM

BITE-BUMPER™*




Bite Bumpers™ werden in Fällen von Tiefbiss eingesetzt. Sie gestatten eine atraumatische Bissperrung im Frontzahnbereich und verhindern damit den Verlust von bukkal geklebten Brackets in der UK Front. Sie sind insbesondere auch bei Anwendung von Keramik- oder ligaturenfreien Brackets geeignet.

Die neuartige, fest montierte Setzhilfe ermöglicht eine korrekte Platzierung auf der Palatinalfläche der mittleren Schneidezähne und stellt eine Parallelität der beiden Bite-Bumpers™ sicher.

Bite-Bumpers™ sind aus einem speziellen Komposit Polymer gefertigt, das einen hohen Anspruch an Komfort und Ästhetik erfüllt und auch bei Patienten mit Nickelüberempfindlichkeit geeignet ist.

Bite-Bumpers™ werden auf die gleiche Weise wie Metallbrackets gebondet. Bite-Bumpers™ haben eine Basis mit mechanischen Unterschnitten.

Die Setzhilfe kann nach dem Bonding manuell oder mit einem Cutter leicht entfernt werden (siehe Abbildungen).

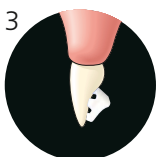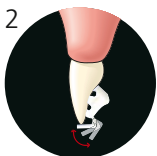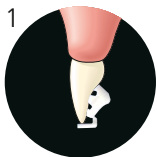

Gebrauchsanweisung

1. Beim Bondingvorgang platzieren Sie die Setzhilfe gegen die Schneidekante.
2. Entfernen Sie die Setzhilfe, nachdem das Adhäsiv ausgehärtet ist.
3. Fertig gesetzter Bite-Bumper™.

Lieferprogramm

Bite-Bumper™ 10 Stück REF 705-000-00

Zur atraumatischen Bissperrung *Opens deep bite without trauma*

Bite-Bumpers™ work in open and deep bite cases by allowing the anteriors to ride up and out of occlusion. The Bite-Bumpers™ eliminate bond failures of brackets and are especially valuable with ceramic or self-ligating brackets.

The unique fixed "placement-jig" guarantees the correct height on the lingual of the tooth and makes sure the two Bite-Bumpers™ are 100 % parallel.

The Bite-Bumpers™ are made of a composite polymer that is more comfortable, aesthetic and will increase biocompatibility in nickel sensitive patients.

Bite-Bumpers™ are bonded in the same manner as metal or ceramic brackets. The Bite-Bumpers™ have a slotted mechanical bonding base.

The placement-jig can easily be removed by hand or by a cutting instrument after bonding - see illustration.

Instructions

1. Put the placement-jig against the incisal edge during bonding.
2. Remove the jig when bonding material is cured.
3. Bite-Bumper™ ready.

Availability

Bite-Bumper™ 10 pieces REF 705-000-00

* registered trademark of Gestenco International AB