

tiologic[®]**ANWENDERHINWEISE***tiologic*[®] **digital.**

Datendownload und Integration für die offenen Implantatbibliotheken.

3shape  **dental wings****exocad**

Inhalt.

Dentaurum Implants bietet den Service, die tioLogic® CAD/CAM-Datensätze für **3shape**, **dental wings** und **exocad** herunterzuladen und sie in die jeweilige Software zu integrieren.


Sie gelangen entweder über die Homepage www.dentaurum-implants.de oder mit dem direkten Pfad über www.dentaurum-implants.de/cadcam zu der Serviceseite.

Seite 4 – 9 Datendownload

Seite 10 – 13 Installation der Bibliothek **3shape**

Seite 14 – 19 Installation der Bibliothek **dental wings**

Seite 20 – 23 Installation der Bibliothek **exocad**

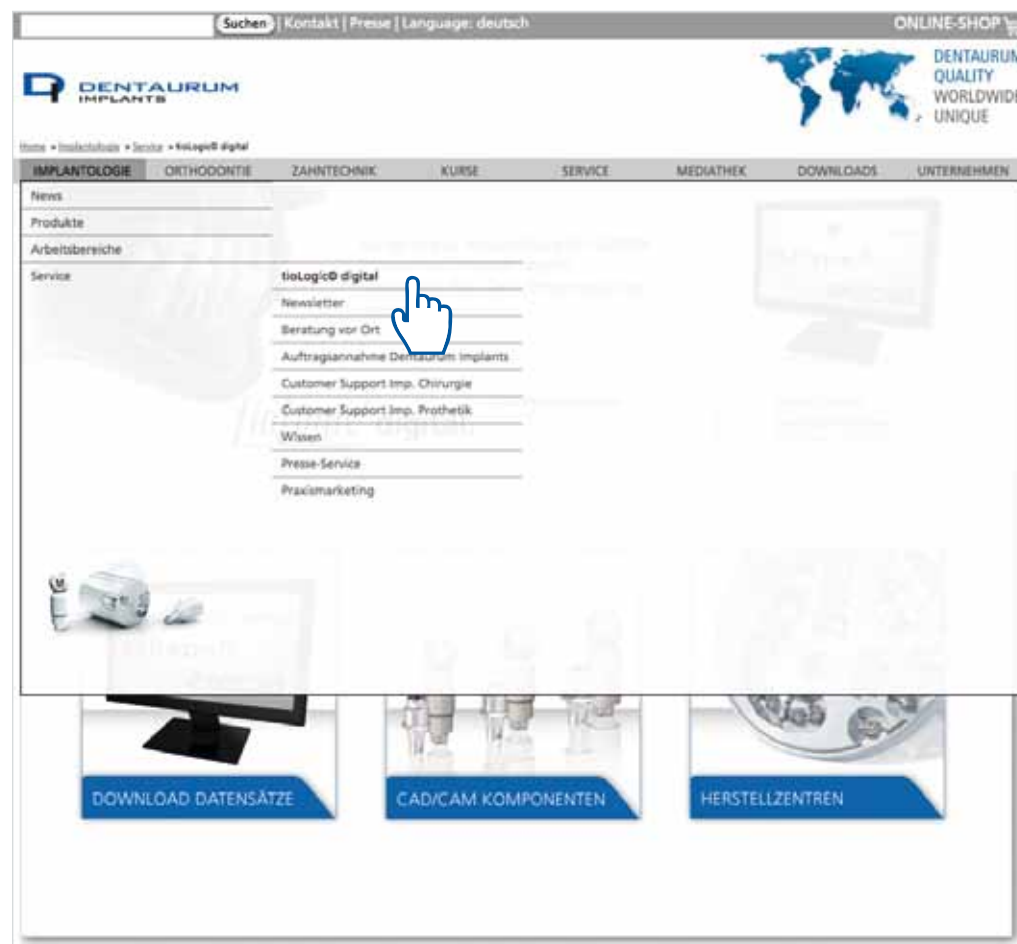

Datendownload.

Im Folgenden werden zunächst der Datendownload beschrieben und anschließend die Datenintegration in die jeweilige Software erläutert.

Wählen Sie bitte „Download Datensätze“.



Datendownload.

Selektieren Sie Ihren Softwareanbieter (hier: 3shape).

Der Download erfolgt nach dem Login mit Ihrer Kundennummer und Ihrem persönlichen Passwort.



Datendownload.

Jetzt laden Sie Ihren Datensatz herunter. Vorab bestätigen Sie durch einen Haken die Haftungshinweise.

Speichern Sie die jeweilige Datei auf Ihrem PC ab (z. B. Desktop oder Download).



Installation der Bibliothek 3shape



Starten Sie das „3Shape Dental System Control Panel“ und öffnen Sie hier unter „Werkzeuge“ den Menüpunkt „Import/Export“.




Installation der Bibliothek 3shape

Klicken Sie nun auf den Button „Materialien importieren“.
Es öffnet sich ein Dialog, in dem Sie bitte die gerade abgespeicherte Datei
(z. B. Desktop oder Download) „DI_tioLogic_Library_3S13-08.dme“ auswählen.

Anschließend öffnet sich der Dialog „Materialien importieren und aktualisieren“.
Klicken Sie hier auf den Button „Import“.

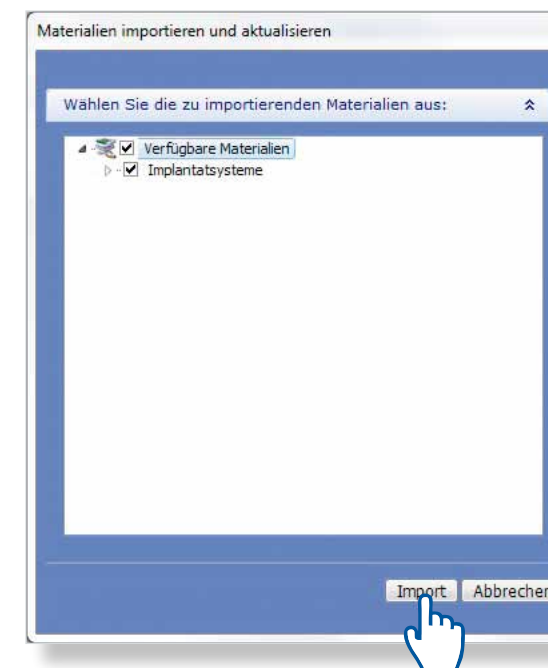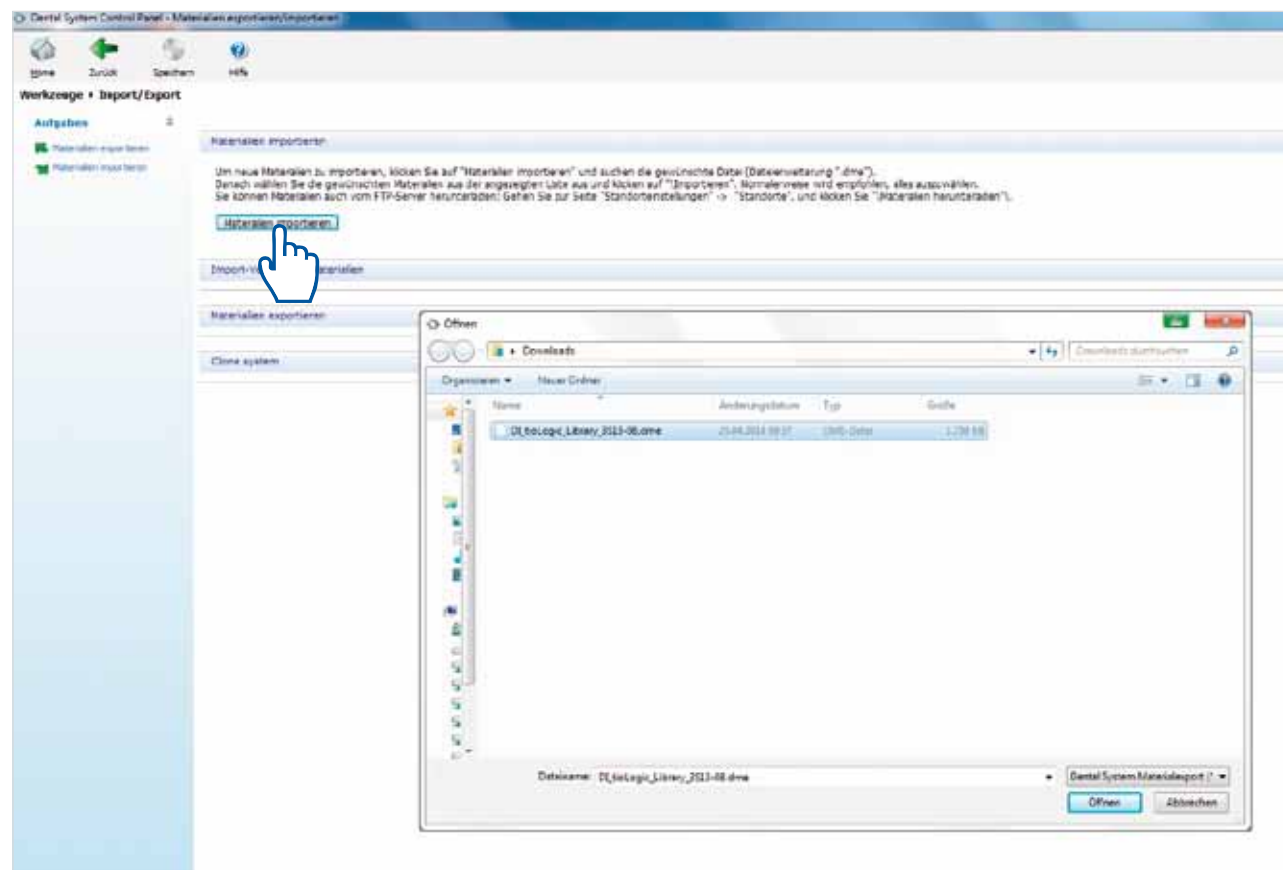


Das Ende des Imports wird angezeigt durch die Meldung „Materialien wurden erfolgreich importiert“.
Klicken Sie hier auf „OK“.

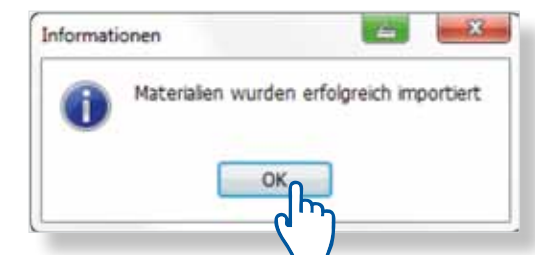

! Kontrollieren Sie bitte den Import, indem Sie im Dental Manager einen neuen Auftrag mit tioLogic® Implantatsystem anlegen.

Installation der Bibliothek **dental wings**



Starten Sie den „dental wings CADClient“ und öffnen Sie hier unter „Anwendungen“ den Menüpunkt „Implantat Kit“.

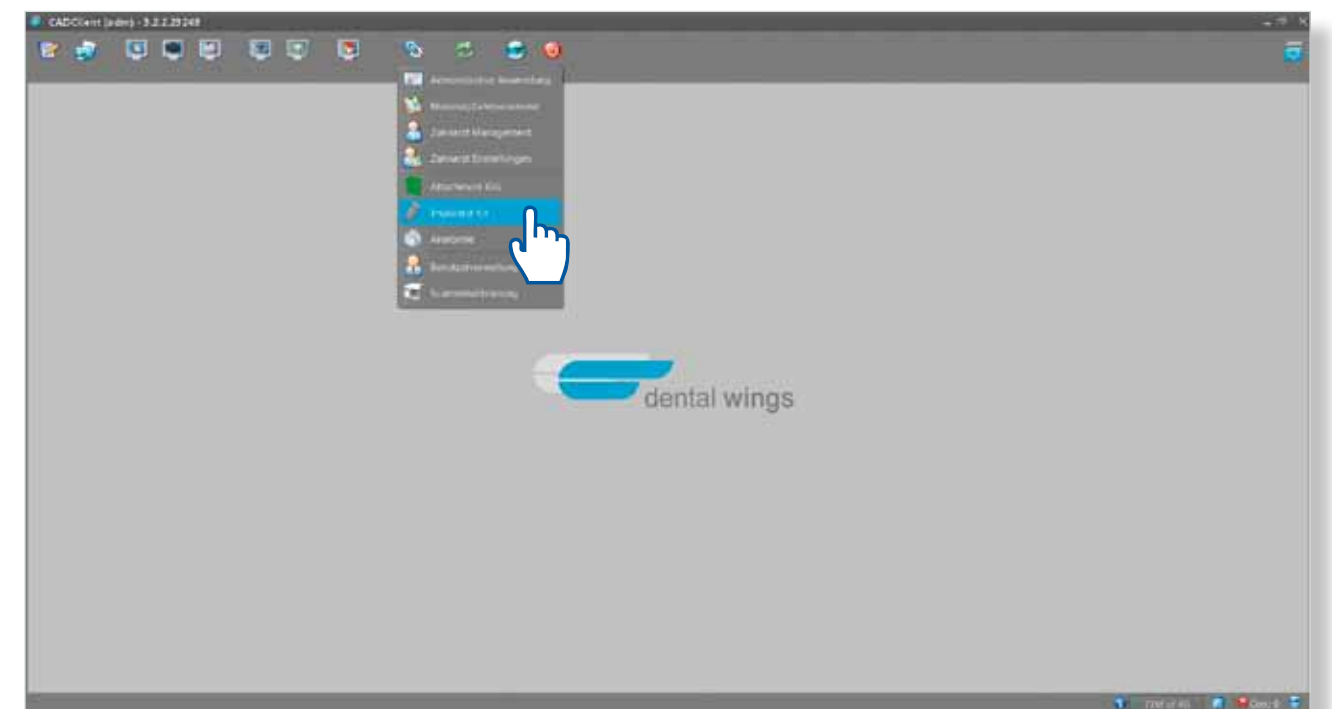

Installation der Bibliothek **dental wings**


Wählen Sie nun im Implantat Kit Editor unter „**Implantat Kits**“ mit der rechten Maustaste im Kontextmenü den Punkt „**Import Implant Manufacturer Kits**“.

Es öffnet sich ein Dialog, in dem Sie bitte die gerade abgespeicherte Datei (z. B. Desktop oder Download) „**DI-tioLogic_Library_13-5.zip**“ auswählen und mit „**Öffnen**“ bestätigen.

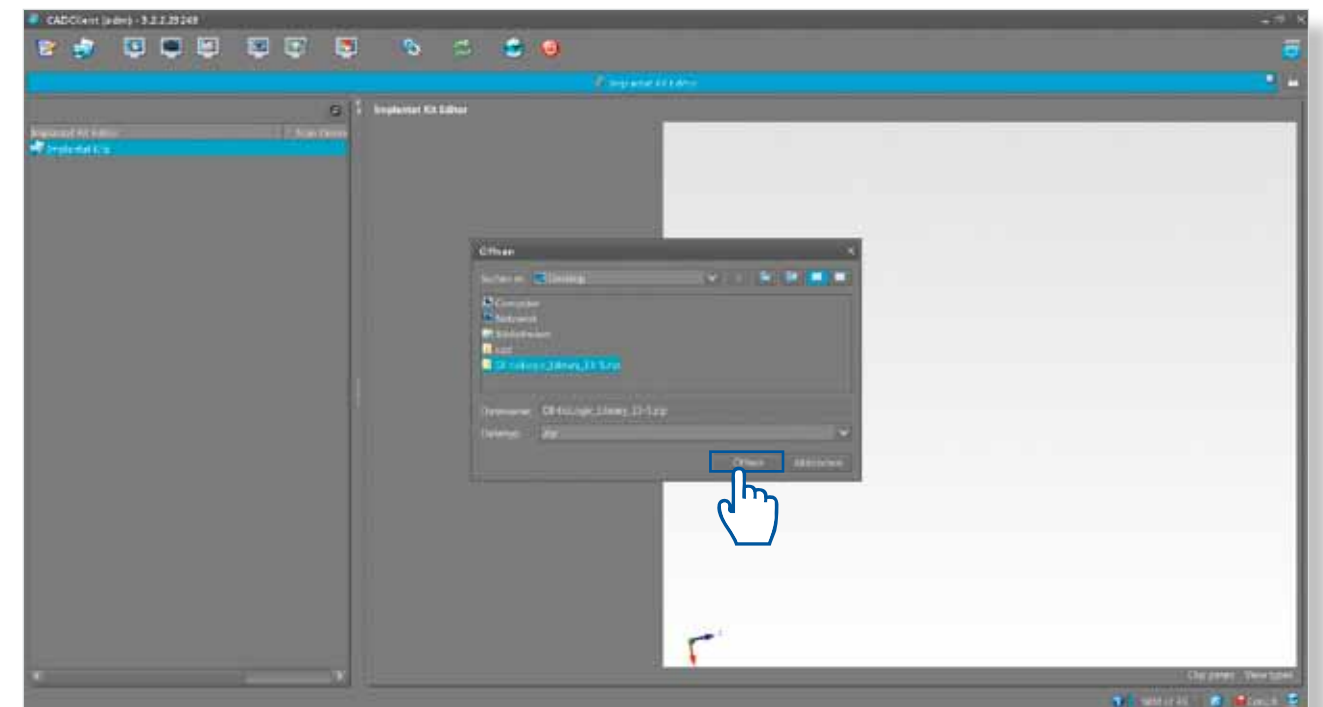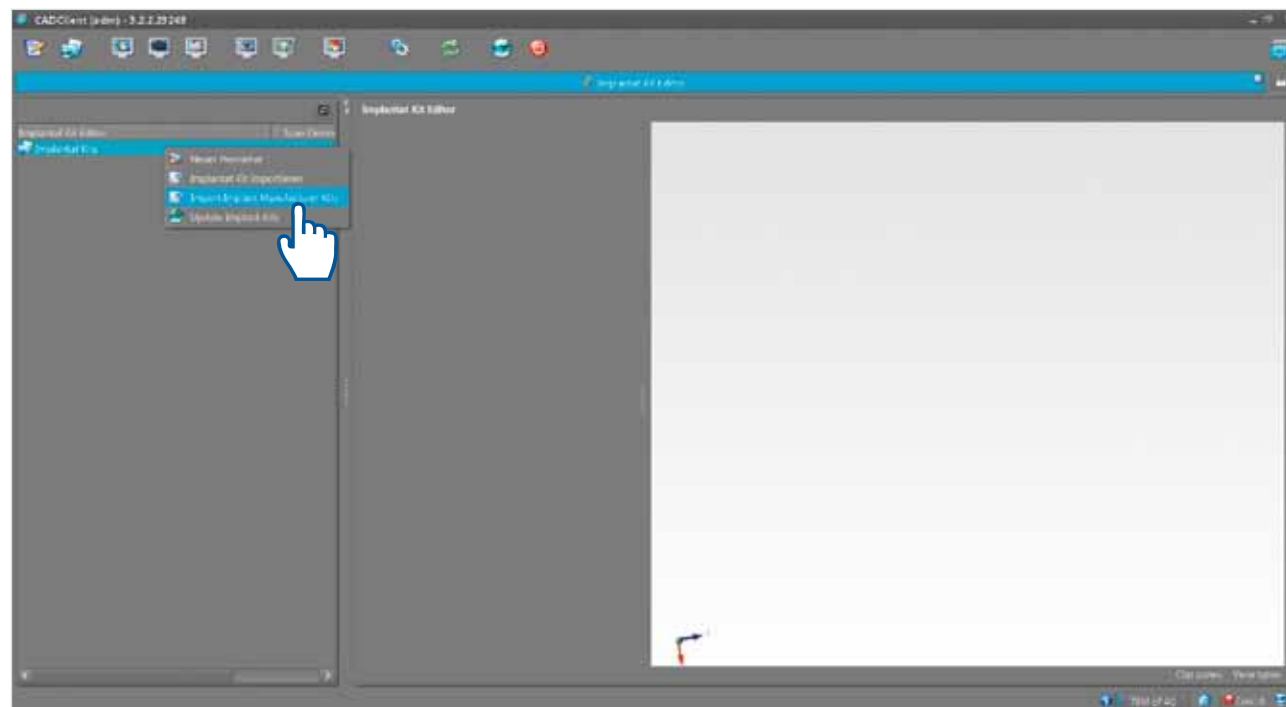

Installation der Bibliothek **dental wings**

Es wird automatisch das komplette Datenpaket unter „Implantat Kits“ integriert.

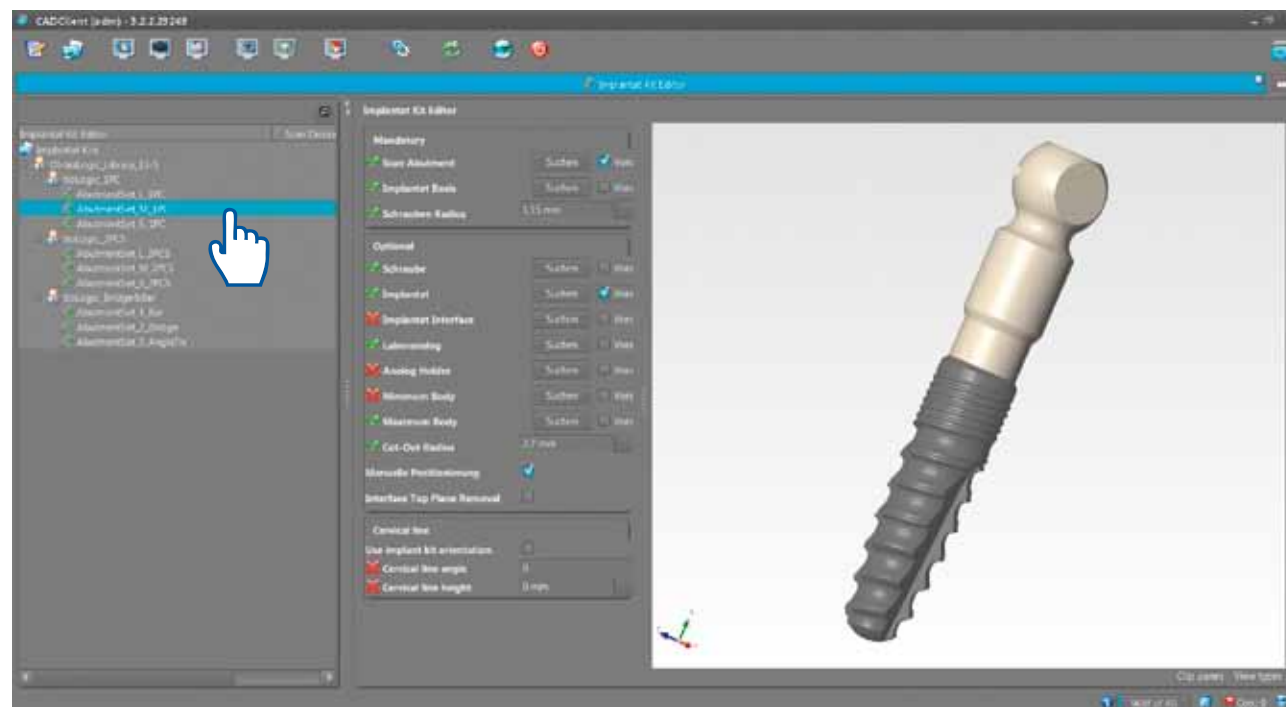


! Kontrollieren Sie bitte den Import, indem Sie im **DWClient** einen neuen Auftrag mit tioLogic® Implantatsystem anlegen.

Installation der Bibliothek **exocad**

Wählen Sie bitte die gerade abgespeicherte Datei (z. B. Desktop oder Download)
„**DI-tioLogic_Library_13-4.zip**“ aus. Mittels eines Komprimierungsprogramms (z. B. 7-Zip)
wird mit der rechten Maustaste im Kontextmenü die Datei extrahiert/entpackt.



exocad

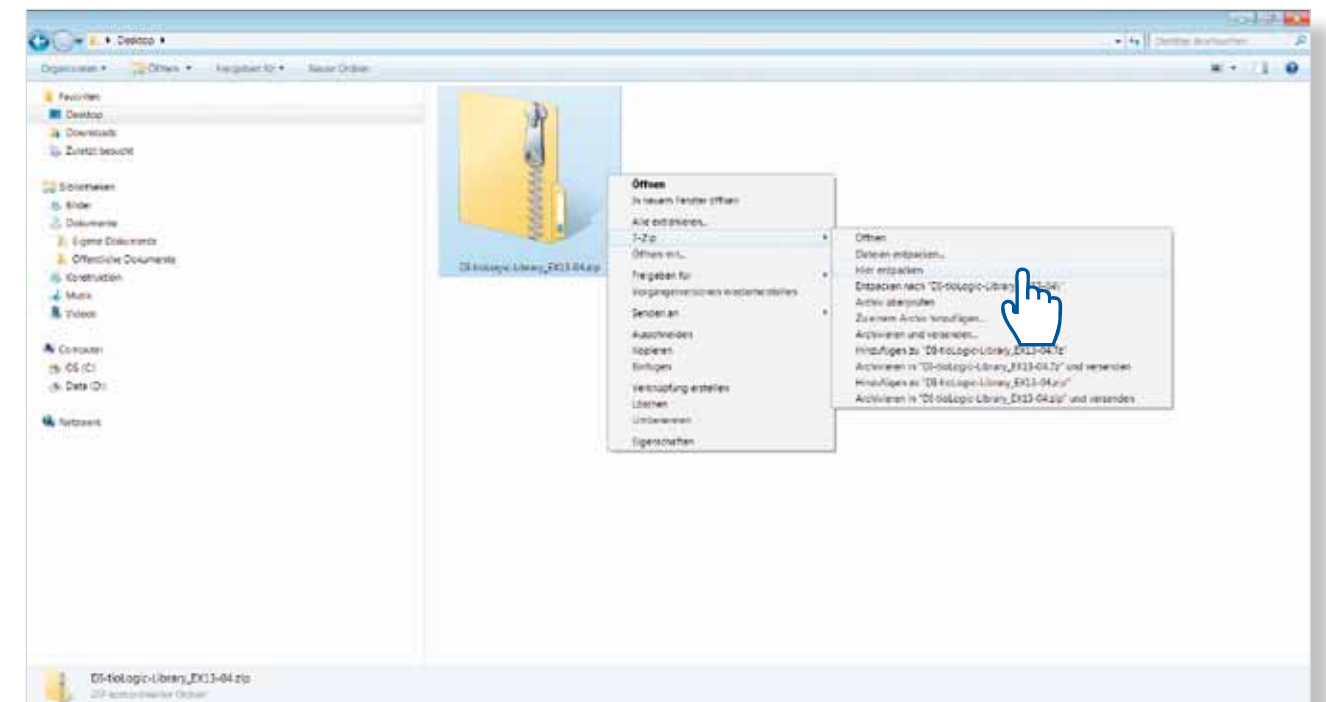

Installation der Bibliothek **exocad**

Wählen Sie die extrahierte Datei „DI-tioLogic_Library_13-4“ aus. Mit einem erneuten Klick der rechten Maustaste im Kontextmenü bitte die Datei kopieren.

Fügen Sie die kopierte Datei unter „exocad/DentalCADApp/library/implant“ ein.

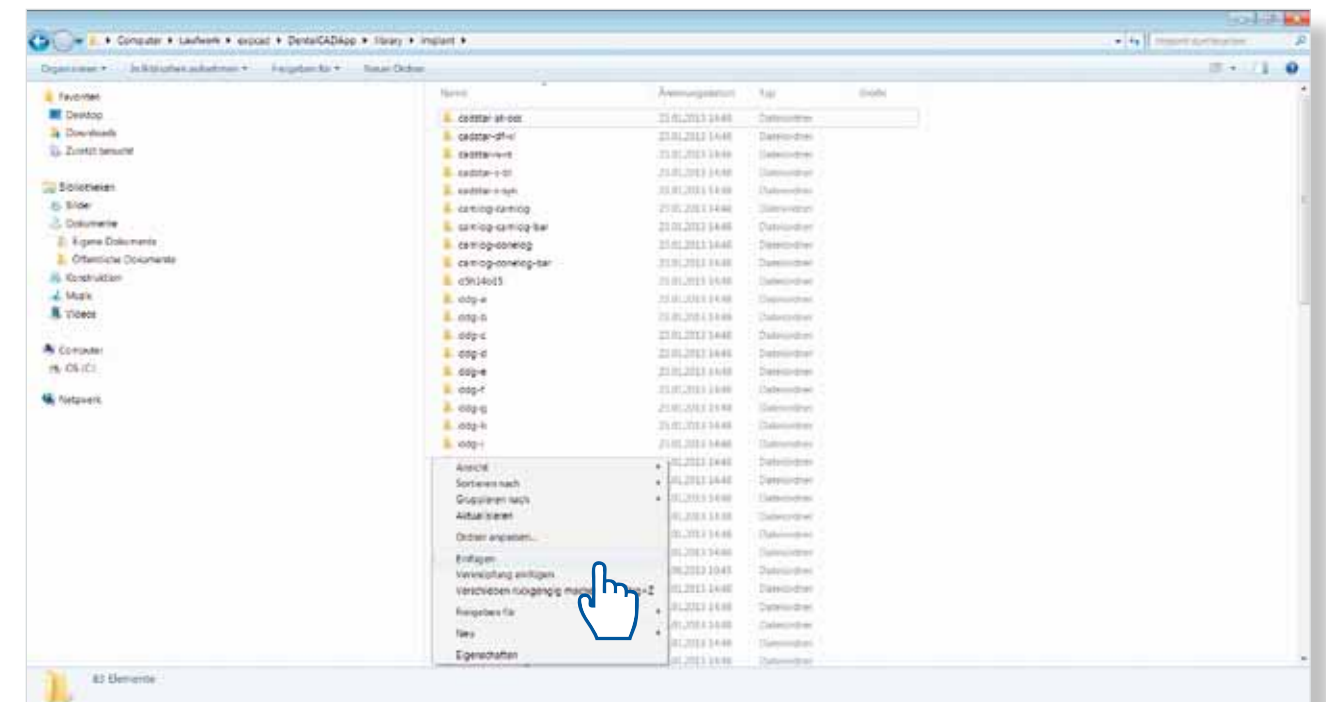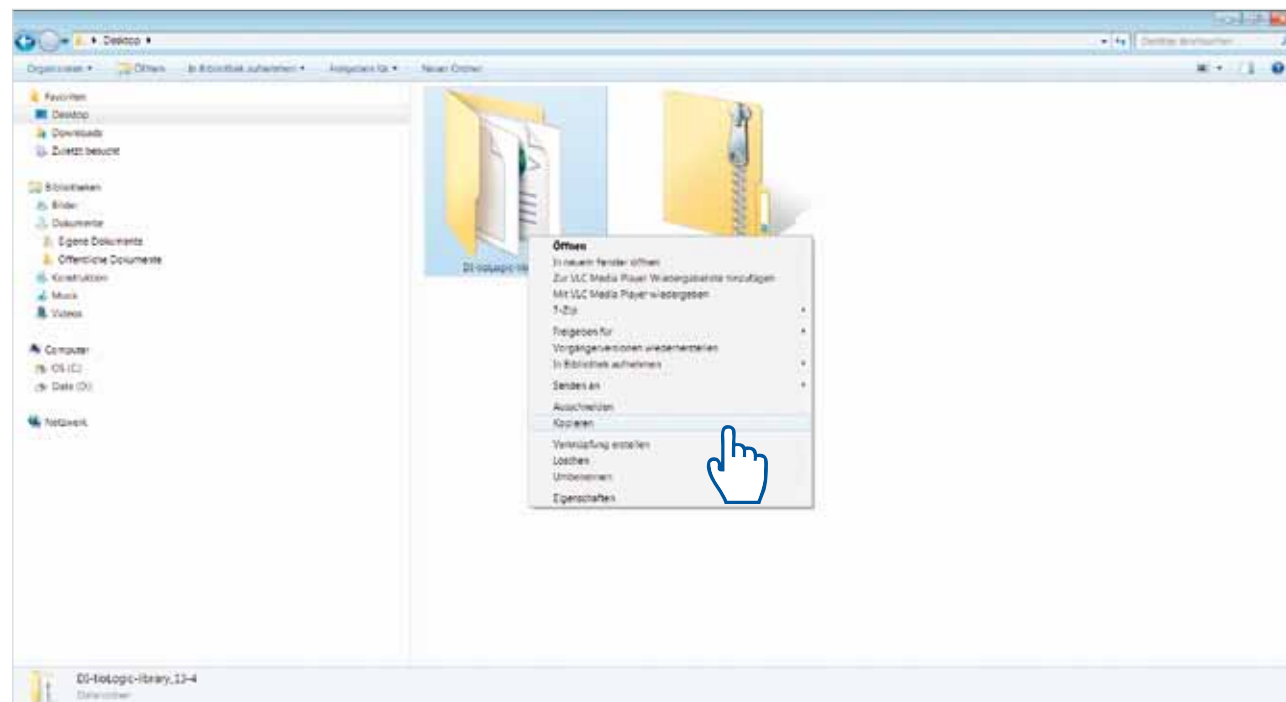

! Kontrollieren Sie bitte den Import, indem Sie im **Dental DB** einen neuen Auftrag mit tioLogic® Implantatsystem anlegen.

Dentaurum-Gruppe

Deutschland | Benelux | España | France | Italia | Switzerland | Australia | Canada | USA
und in über weiteren 130 Ländern weltweit.



DENTAURUM
QUALITY
WORLDWIDE
UNIQUE

- ➔ Informationen zu Produkten und Serviceleistungen finden Sie unter www.dentaurum.de
- ➔ Einfach und schnell bestellen im **Dentaurum Online-Shop** – auch mobil über die kostenlose Katalog-App
- ➔ Beachten Sie auch unser spezielles Kursangebot. Hotline: +49 72 31/803-470

Hotline zahnärztliche Implantologie: +49 72 31/803-590 | Hotline zahntechnische Implantologie: +49 72 31/803-410
Telefonische Auftragsannahme: +49 72 31/803-560 | Gebührenfreie Fax-Nummer (Deutschland): 0 800/4 14 24 34

Stand der Information: 07/14

Änderungen vorbehalten



www.dentaurum.de