




passion and
precision.




-
- Transparentes Alignermaterial für eine nahezu unsichtbare Behandlung.

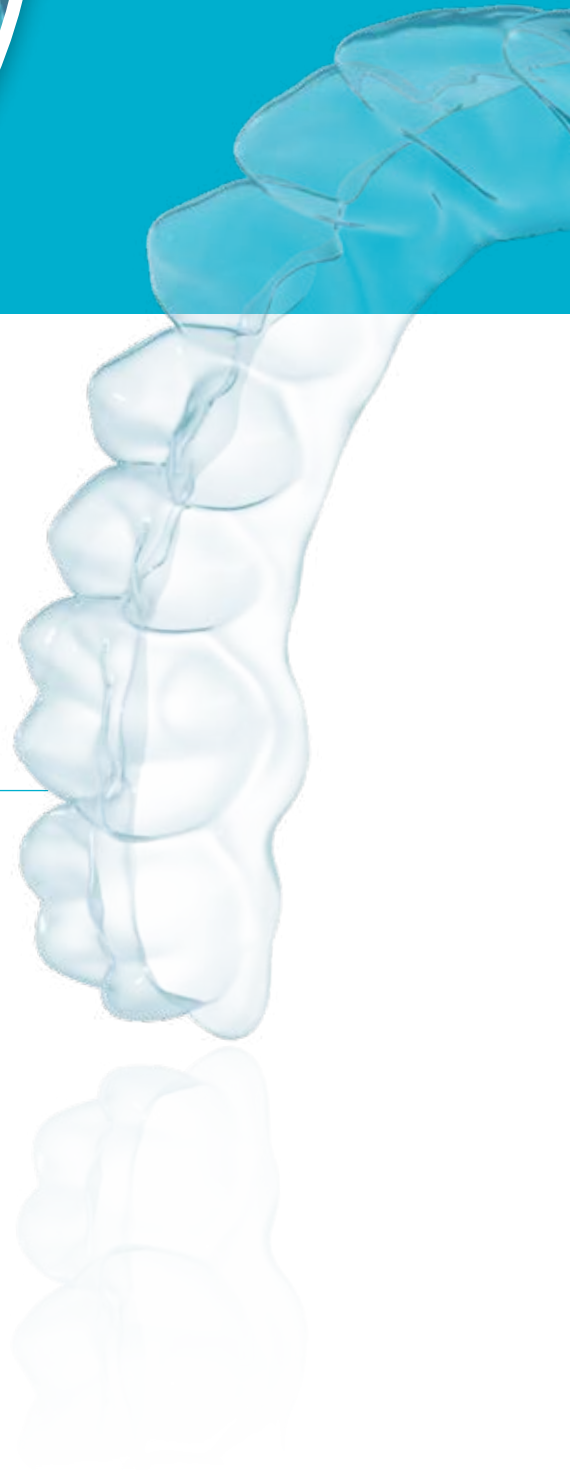

prime4me® Aligner.

Innovatives Schienenkonzept für optimale Behandlungsergebnisse.

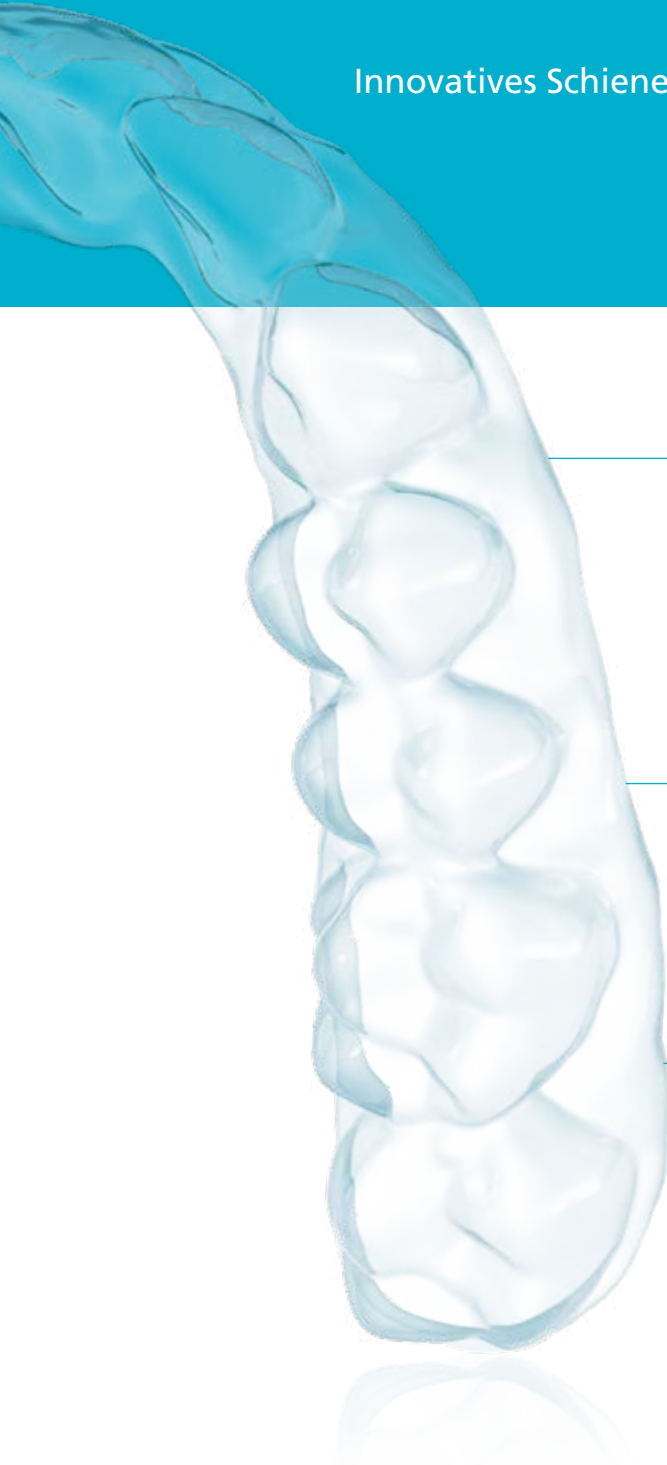


Aligner bedeckt einen Teil der Gingiva für bessere Kraftübertragung.

Digitale Fallplanung mit OnyxCeph^{3™}.

Persönliche Beratung durch erfahrenes Support-Team.

2-Schienen Behandlungskonzept.

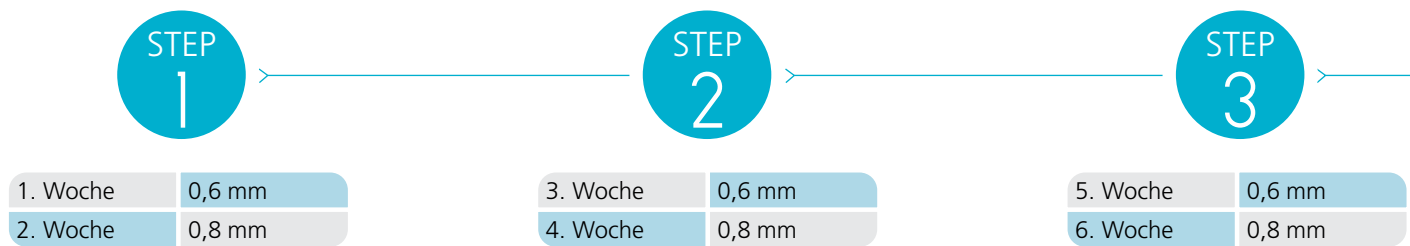

Vorteile.

- Optimale Kraftübertragung durch zwei Folienstärken: weich (ø 0,6 mm) und hart (ø 0,8 mm).
- Pro Step bis zu 0,5 mm Bewegung möglich: Dadurch wird eine auf die jeweilige Situation optimale Behandlungsdauer möglich.
- Schonende und sanfte Alignertherapie: Die weiche Folie initiiert die Bewegung. Die harte Folie führt im Anschluss die Bewegung fort und stabilisiert die durchgeführte Bewegung. Somit wird eine kontinuierliche, behutsame Zahnbewegung pro Step durchgeführt.
- Höhere Patientencompliance durch wöchentlichen Alignerwechsel: Patienten starten jede Woche mit frischen und neuen Alignern.
- Wöchentlicher Wechsel hat positive Effekte: Weniger Verfärbung und Plaqueansammlung auf der Aligneroberfläche bei voller Kraftübertragung.
- Inklusive kostenfreiem 3D Viewer für die Patientenberatung und zur Ansicht des Behandlungsvorschlags. Beispiel siehe www.prime4me.com

STEP
4

7. Woche	0,6 mm
8. Woche	0,8 mm

STEP
5

9. Woche	0,6 mm
10. Woche	0,8 mm

etc.



weich: Folie ø 0,6 mm



hart: Folie ø 0,8 mm

2-Schienen Behandlungskonzept.




Mit prime4me® Aligner kann ein breites Spektrum an Zahnfehlstellungen behandelt werden.


Mögliche Indikationen sind:

-  Engstand
-  Lückenschluss
-  Tiefer Biss
-  Offener Biss
-  Kreuzbiss
-  Korrektur der Mittellinie
-  Overjet-Overbite Korrektur


Sprechen Sie uns an: Wir prüfen gemeinsam mit Ihnen, ob prime4me® Aligner für Ihren individuellen Patientenfall geeignet ist.

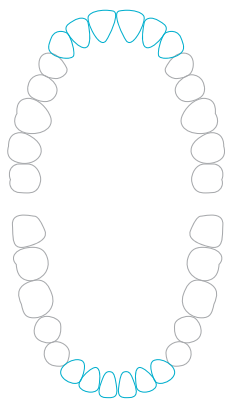

3 – 3

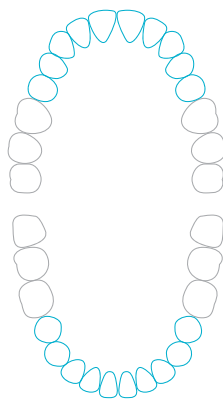

5 – 5

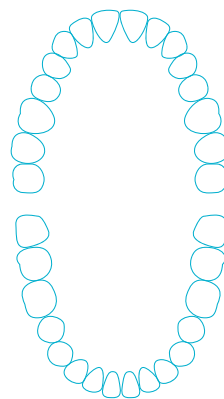

7 – 7

	smart	advanced	performance
Steps	bis 5	6 – 9	10 – 15
Dauer	≈ 70 Tage ≈ 10 Wochen	≈ 126 Tage ≈ 18 Wochen	≈ 210 Tage ≈ 30 Wochen
Aligner pro Kiefer	2 – 10	12 – 18	20 – 30
Aligner insgesamt	4 – 20	24 – 36	40 – 60
Lieferungen	1	2	3

Die Behandlungsplanung erfolgt in enger Abstimmung mit Ihnen. Ihre Änderungswünsche werden von unseren erfahrenen Planern berücksichtigt und Sie erhalten nach kurzer Zeit eine aktualisierte Fallplanung zur Freigabe.

Erst nach Ihrer Freigabe in der Bestellplattform werden die Aligner gefertigt. Falls die Behandlung nach Erstellung der Fallplanung abgebrochen wird, berechnen wir lediglich eine Pauschale* für die Behandlungsplanung.

Bei advanced und performance sind Zwischenkontrollen mit Intraoralscans oder Modellscans eingeplant, um den Fortschritt der Behandlung zu beobachten. Die Behandlungsplanung wird bei Bedarf angepasst. Die auf Basis der aktuellen Situation angepassten Aligner werden anschließend gefertigt und an Ihre Praxis versendet. Unsere zielgerichtete Alignerfertigung ist ressourcensparend und schont somit die Umwelt.

*siehe Preisliste.

Attachments.

Falls Attachments für die Behandlung Ihres Patienten notwendig sind, werden diese von unserem zahntechnischen Fachpersonal in der Planung berücksichtigt. Die Attachment Guides (Übertragungsschienen) liegen der Lieferung bei.



Eine Step-by-Step Anleitung für die Anwendung der Attachment Guides und die Befestigung der Attachments finden Sie in unserem Download-Center.



Vestibuläre Attachments.



Linguale Attachments.



Mehr Informationen
und Zubehör unter:

www.dentaurum.com



Approximale Schmelzreduktion.

In manchen Fällen ist es notwendig interdental Raum zu schaffen, damit gewünschte Zahn-
bewegungen ermöglicht werden können. Die
approximale Schmelzreduktion (ASR) kann dabei
mesial und/oder distal erfolgen. Eine ausführliche
Anweisung, wie viel Schmelz an welchem Zahn
reduziert werden soll, liegt der Lieferung bei
oder ist auch online auf digital.dentaurum.de
bei Ihrem Auftrag hinterlegt.

Dentaurum Digital.



Innovative Bestellplattform für Produkte von morgen.



prime4me® Aligner:

Innovatives Schienenkonzept für optimale Behandlungsergebnisse.



prime4me® Modelldruck:

Sockelmodelle und Zahnkranzmodelle für die Kieferorthopädie.



prime4me® RETAIN3R:

Einzigartige Passung durch dreidimensionale Konstruktionsgestaltung.



Vorteile.

-  Einfache und intuitive Bestellmöglichkeit für alle Dentaurum Digital Produkte.
-  Einfacher Upload von Dateien.
-  Aktuelle Statusanzeige Ihrer Aufträge.
-  Archiv aller offenen und abgeschlossenen Aufträge.
-  Auftragsbezogene Kommunikation mit erfahrenen Supportmitarbeitern online über die Bestellplattform.



Jetzt entdecken:
digital.dentaurum.de

Dentaurum

Deutschland | Benelux | España | France | Italia | Switzerland | Australia | Canada | USA
und in über weiteren 130 Ländern weltweit.



DENTAURUM
QUALITY
WORLDWIDE
UNIQUE

KUNDENSERVICE

+49 72 31 / 803 - *Durchwahl*

Festsitzende Technik	- 550
Herausnehmbare Technik	- 555
Customer Support Digital	- 280
Auftragsannahme	- 210

Faxbestellung 0800 / 4 14 24 34
(gebührenfrei aus Deutschland)



ONLINE SHOP
shop.dentaurum.com



KUNDENSERVICE prime4me®

Customer Support Digital

+49 72 31 / 803 - 280 | digital@dentaurum.de

Jetzt bestellen:
digital.dentaurum.de



Stand der Information: 2023-02
Änderungen vorbehalten

D
DENTAURUM