



The symbol for smarter zirconia



ceraMotion® Z Hybrid – informations sur l'imbrication


Avec ceraMotion® Z Hybrid, vous pouvez obtenir des résultats fiables et reproductibles en matière de teinte et de caractéristiques mécaniques.


La zircone polychrome et multicouche **ceraMotion® Z Hybrid** est un véritable matériau polyvalent. Ce disque allie l'esthétique d'une zircone cubique et la résistance d'une zircone hautement translucide.

ceraMotion® Z Hybrid, c'est de l'esthétique pure, un produit qui se prête à toutes les restaurations dans les régions antérieure et postérieure. Grâce à un procédé de haute technologie spécial, deux matériaux en zircone distincts sont réunis dans un disque. **ceraMotion® Z Hybrid** est disponible dans les teintes V les plus usuelles et les teintes bleach et assure une reproduction sûre des teintes.

Avantages du produit :

- Reproductibilité sûre pour une esthétique de haut niveau
- Se prête à de nombreuses indications du fait de sa forte résistance en zone dentinaire
- Transitions chromatiques fluides et naturelles de la zone cervicale à la zone incisale
- Grande résistance à la déformation pour les bridges de grande portée
- Disponible dans les teintes V les plus usuelles et les teintes bleach
- Excellente fraissabilité
- Température de frittage recommandée 1480 °C
- Translucidité 44 % – 47 % (non coloré, 1,0 mm)
- Finition économique avec ceraMotion® One Touch
- Incrustation cosmétique sûre avec ceraMotion® Zr

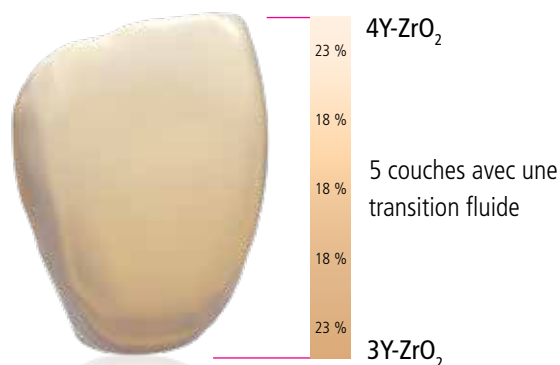

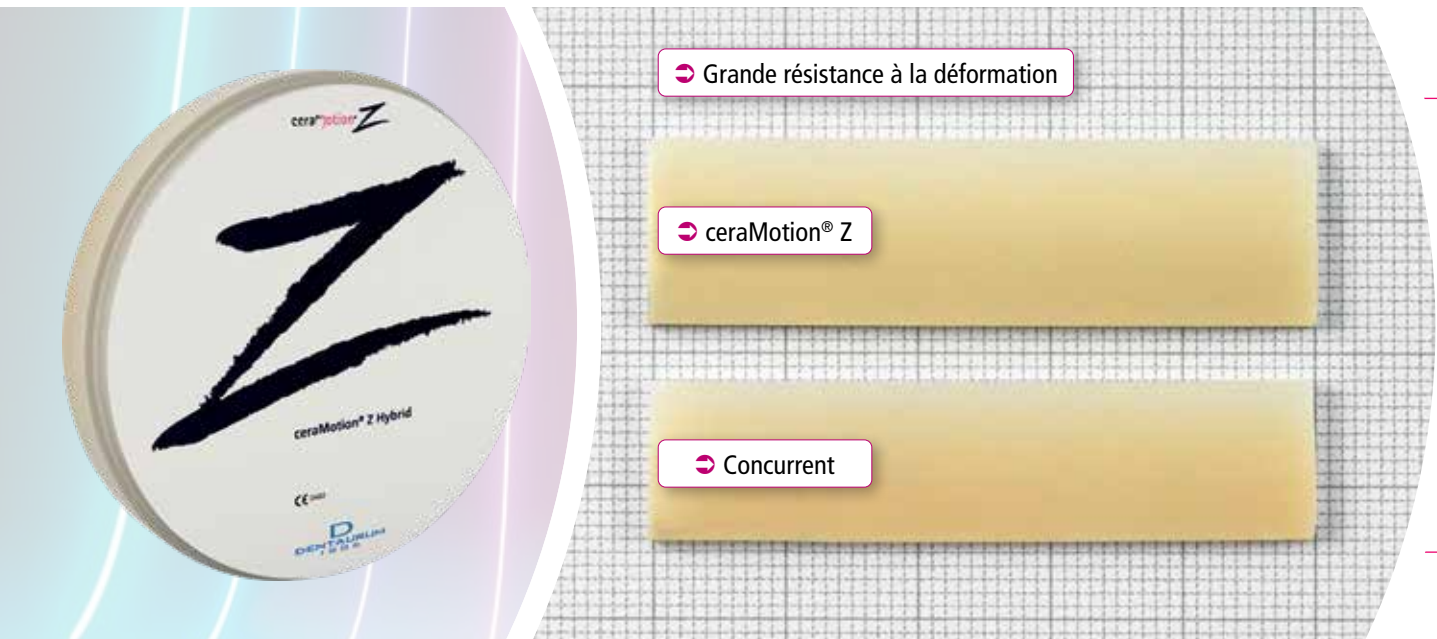

Choisir la bonne hauteur de disque !

La hauteur du disque doit être la plus proche possible de la couronne agrandie, élaborée en CAO.

Comment choisir la bonne hauteur de disque ?

Couronne élaborée en CAO jusqu'à 10 mm	→ hauteur de disque de 14 mm
Couronne élaborée en CAO jusqu'à 13,4 mm	→ hauteur de disque de 18 mm
Couronne élaborée en CAO jusqu'à 16 mm	→ hauteur de disque de 22 mm

Aperçu

Teinte	REF (14 mm)	REF (18 mm)	REF (22 mm)	Quantité
A1	272-411-14	272-411-18	272-411-22	1 pièce
A2	272-412-14	272-412-18	272-412-22	1 pièce
A3	272-413-14	272-413-18	272-413-22	1 pièce
A3,5	272-415-14	272-415-18	272-415-22	1 pièce
A4	272-414-14	272-414-18	272-414-22	1 pièce
B1	272-421-14	272-421-18	272-421-22	1 pièce
B2	272-422-14	272-422-18	272-422-22	1 pièce
C2	272-432-14	272-432-18	272-432-22	1 pièce
Bleach 1	272-300-14	272-300-18	272-300-22	1 pièce
Bleach 2	272-400-14	272-400-18	272-400-22	1 pièce

