

Carnet implantaire

Sécurité et esthétique
pour plus de bien-être.



Ces Dispositifs Médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation le Marquage CE 0483. Lire attentivement les instructions d'utilisation dans la notice ou sur l'étiquette avant toute utilisation. Consulter votre praticien.

Très important !

Chère patiente,
Cher patient,

veuillez conserver précieusement ce carnet. Amenez-le toutes les fois que vous viendrez à notre cabinet dentaire. Cela, afin que nous puissions y inscrire chaque séance de contrôle effectuée.

Par avance, nous vous en remercions.

L'équipe soignante

Cachet du cabinet dentaire, date et signature

Sommaire.

Vos données personnelles	4
--------------------------	---

Introduction

Informations très importantes	6
Juste après l'opération	8

Restaurations

1 Implant et prothèse	12
2 Implant et prothèse	16
3 Implant et prothèse	20

Tout sur les soins à effectuer

Questions souvent posées	24
--------------------------	----

Documentation

Visites de contrôle	32
---------------------	----

Vos données personnelles.

Prénom

Nom

Rue et N°

Code postal et localité

Date de naissance

Caisse d'assurance maladie

Allergies connues



Les points sur lesquels vous devez être très vigilant(e).

Afin que vos implants puissent s'intégrer dans l'os de manière pérenne et pour que la pose de votre prothèse soit rapide et couronnée de succès, il est indispensable d'attirer votre attention sur des points très précis qui vous ont déjà été expliqués lors de l'entretien d'information avec votre praticien. Dans les pages qui suivent, nous vous rappellerons tous ces précieux conseils. Nous vous prions de les suivre très attentivement.

Introduction.

Informations très importantes.

Autres informations importantes.

- Pages 12–23** Toutes les informations relatives à vos implants y sont consignées. Ces données sont importantes car votre nouveau dentiste (si vous déménagez) ou celui de votre lieu de vacances en aura besoin.
- Pages 24–31** Les instructions et recommandations pour l'entretien et le nettoyage de votre prothèse dentaire.
- Pages 32–43** Vous trouverez à la fin de ce carnet la liste de vos visites de contrôle.



Juste après l'opération.

- Refroidir la joue de la zone opérée avec de la glace protégée par un linge.
- Evitez les efforts physiques importants (sport, charges lourdes à porter...).
- Ne pas fumer.
- Ne boire aucune des boissons suivantes : café, thé noir, coca-cola, alcool.
- Avant de consommer des aliments, attendre que l'effet de l'anesthésie ait disparu. Ces premiers aliments devront être mous.

Introduction.

Règles à respecter après l'intervention chirurgicale.

Dans la 1^{ère} semaine qui suivra l'opération.

- Ne pas mastiquer dans la zone des implants.
- Ne pas porter sa prothèse si elle exerce une pression excessive sur les implants.
- N'utiliser ni hydropulseur ni brosse à dents électrique dans la zone des implants.
- Brossez-vous les dents régulièrement mais pas dans la zone des implants.
- Demandez à votre dentiste quels



bains de bouche vous pouvez utiliser.

- Rincez-vous bien la bouche après chaque repas, avec de l'eau tiède.
- Évitez les efforts physiques.
- Consultez immédiatement votre dentiste si vous avez des douleurs ou si les implants deviennent visibles.
- N'hésitez pas à poser toutes vos questions à votre dentiste. Il y répondra très volontiers.

Après l'enlèvement des fils.

- Veuillez broser la zone des implants comme vous l'a indiqué votre dentiste.
- Ne pas passer la langue ni mettre les doigts, ne pas s'amuser à toucher les

Introduction.

Règles à respecter après l'intervention chirurgicale.

implants avec la langue ou les doigts.

Après la mise à nu des implants.


- Veuillez procéder comme indiqué au paragraphe « Dans la 1^{ère} semaine qui suivra l'opération ».

Après la mise en place de la prothèse.

- Bien suivre les conseils d'entretien et de nettoyage de votre dentiste.
- Il est indispensable de se rendre à toutes les visites de contrôle périodique.

La 1^{ère} restauration.

Implants

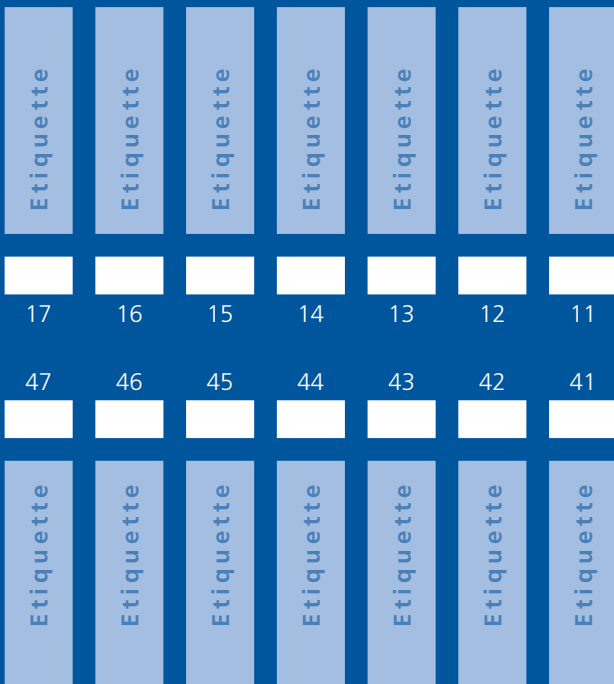

Abréviations: E = couronne unitaire ; B = bridge ; S = attachement ; G = barre fraisée ;

Date			Signature			
Etiquette	Etiquette	Etiquette	Etiquette	Etiquette	Etiquette	Etiquette
21	22	23	24	25	26	27
31	32	33	34	35	36	37
Etiquette	Etiquette	Etiquette	Etiquette	Etiquette	Etiquette	Etiquette

T = télescope ; K = ancrage « boule » ; L = LOCATOR® ; M = aimant ; A = AngleFix; SFI = SFI-Bar®

La 1^{ère} restauration.

Remarques

Remarques sur les implants

Date

--

Signature

--

Remarques sur la prothèse

Date

--

Signature

--

Prothèse

Date de mise en bouche

Date, Signature


Composants prothétiques utilisés

Alliage utilisé (nom de l'alliage, fabricant)

Céramique utilisée (nom de la céramique, fabricant, couleur)

La 2^{ème} restauration.

Implants

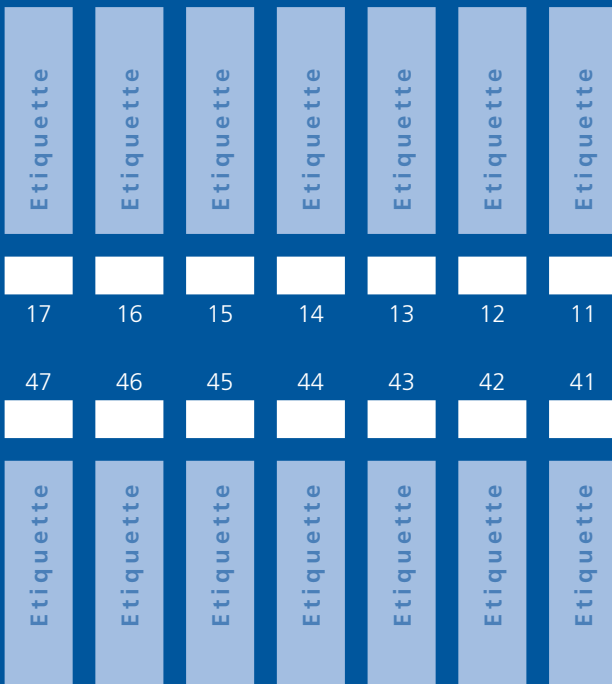

Abréviations: E = couronne unitaire ; B = bridge ; S = attachement ; G = barre fraisée ;

Date			Signature			
Etiquette	Etiquette	Etiquette	Etiquette	Etiquette	Etiquette	Etiquette
21	22	23	24	25	26	27
31	32	33	34	35	36	37
Etiquette	Etiquette	Etiquette	Etiquette	Etiquette	Etiquette	Etiquette

T = télescope ; K = ancrage « boule » ; L = LOCATOR® ; M = aimant ; A = AngleFix; SFI = SFI-Bar®

La 2^{ème} restauration.

Remarques

Remarques sur les implants

Date

--

Signature

--

Remarques sur la prothèse

Date

--

Signature

--

Prothèse

Date de mise en bouche

Date, Signature


Composants prothétiques utilisés

Alliage utilisé (nom de l'alliage, fabricant)

Céramique utilisée (nom de la céramique, fabricant, couleur)

La 3^{ème} restauration.

Implants

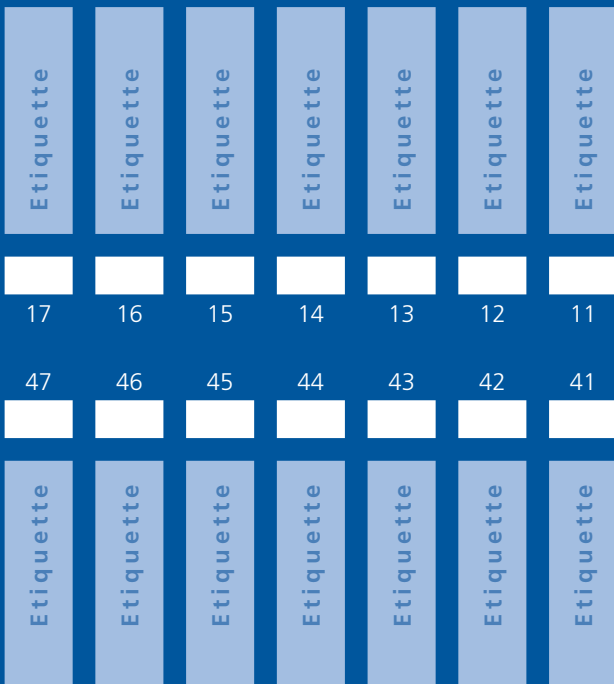

Abréviations: E = couronne unitaire ; B = bridge ; S = attachement ; G = barre fraisée ;

Date			Signature			
Etiquette	Etiquette	Etiquette	Etiquette	Etiquette	Etiquette	Etiquette
21	22	23	24	25	26	27
31	32	33	34	35	36	37
Etiquette	Etiquette	Etiquette	Etiquette	Etiquette	Etiquette	Etiquette

T = télescope ; K = ancrage « boule » ; L = LOCATOR® ; M = aimant ; A = AngleFix; SFI = SFI-Bar®

La 3^{ème} restauration.

Remarques

Remarques sur les implants

Date

--

Signature

--

Remarques sur la prothèse

Date

--

Signature

--

Prothèse

Date de mise en bouche

Date, Signature

Composants prothétiques utilisés

Alliage utilisé (nom de l'alliage, fabricant)

Céramique utilisée (nom de la céramique, fabricant, couleur)



Tout sur les soins à effectuer.
Pour des années de confort et de tranquillité.



Votre dentiste vous a certainement expliqué à quel point il est important de prendre soin de vos dents et notamment de celles posées sur des implants ! Autrement dit : pour que vos implants vous donnent entière satisfaction longtemps : ayez toujours une parfaite hygiène bucco-dentaire en nettoyant consciencieusement et régulièrement votre dentition.

Bien entretenir ses dents n'est pas compliqué. Vous devez juste suivre les quelques règles que nous mentionnons ci-dessous. Veuillez également suivre les recommandations et conseils de votre praticien qui saura exactement vous dire ce qui conviendra le mieux dans votre cas.



Une brosse à dent neuve brosse mieux.

Brossez vos dents sur implants comme vos autres dents, c'est-à-dire trois fois par jour. Si cela n'est pas possible, brossez-les absolument après le petit déjeuner et avant d'aller vous coucher. Brossez bien toutes les faces de chaque dent en n'oubliant pas les faces masticatrices. Pour plus de précisions, demandez conseil à votre dentiste. Il vous renseignera très volontiers. Utilisez de préférence une brosse à dents souple. Qu'il s'agisse d'une brosse manuelle ou électrique, pensez à la remplacer régulièrement (tous les trois mois).

Tout sur les soins à effectuer.

Utilisez aussi des brossettes interdentaires.

Il est également nécessaire de bien nettoyer les espaces entre vos dents. Ils sont plus difficiles d'accès mais vous y parviendrez avec une brosse interdentaire. Veillez à toujours bien prendre le temps de vous brosser les dents en n'omettant pas les espaces interdentaires. Demandez conseil à votre dentiste sur le type de brosse interdentaire à utiliser.



Le fil dentaire en tant que « fil rouge » d'une bonne hygiène dentaire.

Ayez aussi du fil dentaire dans votre panoplie d'instruments de nettoyage dentaire ! Il vous permettra de nettoyer les endroits auxquels vous ne pourrez pas accéder avec la brossette interdentaire. Très important : veuillez nettoyer ces endroits « cachés » avec le plus grand soin !

Bains de bouche : pour ou contre ?

Normalement vous pouvez en faire. Demandez d'abord conseil à votre dentiste qui saura exactement quoi recommander dans votre cas précis.

Tout sur les soins à effectuer.

Indispensable aussi : le nettoyage de votre denture au cabinet dentaire.

Malgré une bonne hygiène dentaire, il est indispensable de procéder à un nettoyage professionnel dans un cabinet dentaire car ce dernier dispose de moyens et techniques plus efficaces. C'est la raison pour laquelle, en complément de votre brossage individuel, nous vous recommandons de faire effectuer régulièrement un tel nettoyage. Ce nettoyage au cabinet dentaire permet notamment d'enlever les dépôts coriaces, qui sont de véritables niches à bactéries. Là aussi, demandez conseil votre dentiste.



**Avoir confiance, c'est bien ; faire
vérifier, c'est mieux !**

Afin de pouvoir déceler à temps
d'éventuels problèmes, nous vous
conseillons de vous rendre à chacune des
visites de contrôle. Leur fréquence – fixée
par votre dentiste – dépend du risque
inflammatoire dans votre cas.

Visites de contrôle.

Très important !

A chaque visite de contrôle, demandez à votre dentiste de non seulement apposer son cachet dans la case correspondante, mais aussi de bien indiquer la date (merci de vérifier !).

Visites de contrôle.

Cachet

1

Date

Signature

Cachet

2

Date

Signature

Cachet

3

Date

Signature

Cachet

4

Date

Signature

Cachet

5

Date

Signature

Cachet

6

Date

Signature

Cachet

7

Date

Signature

Cachet

8

Date

Signature

Visites de contrôle.

Cachet

9

Date

Signature

Cachet

10

Date

Signature

Cachet

11

Date

Signature

Cachet

12

Date

Signature

Cachet

13

Date

Signature

Cachet

14

Date

Signature

Cachet

15

Date

Signature

Cachet

16

Date

Signature

Visites de contrôle.

Cachet

17

Date

Signature

Cachet

18

Date

Signature

Cachet

19

Date

Signature

Cachet

20

Date

Signature

Cachet

21

Date

Signature

Cachet

22

Date

Signature

Cachet

23

Date

Signature

Cachet

24

Date

Signature

Visites de contrôle.

Cachet

25

Date

Signature

Cachet

26

Date

Signature

Cachet

27

Date

Signature

Cachet

28

Date

Signature

Cachet

29

Date

Signature

Cachet

30

Date

Signature

Cachet

31

Date

Signature

Cachet

32

Date

Signature

Visites de contrôle.

Cachet

33

Date

Signature

Cachet

34

Date

Signature

Cachet

35

Date

Signature

Cachet

36

Date

Signature

Cachet

37

Date

Signature

Cachet

38

Date

Signature

Cachet

39

Date

Signature

Cachet

40

Date

Signature

Visites de contrôle.

Cachet

41

Date

Signature

Cachet

42

Date

Signature

Cachet

43

Date

Signature

Cachet

44

Date

Signature

Cachet

45

Date

Signature

Cachet

46

Date

Signature

Cachet

47

Date

Signature

Cachet

48

Date

Signature



www.dentaurum-implants.de