

Gebrauchsanweisung: Nacera® Blue X

Anwendung

! Allgemeine Hinweise

Nacera® Blue X muss bei Temperaturen zwischen 10 °C und 40 °C gelagert werden. Die Flüssigkeit ist vor **direkter Sonneneinstrahlung** zu schützen. Zur kontaminierungsfreien Verwendung von Nacera® Blue X darf nur ein **metallfreier Pinsel** verwendet werden. Das Fläschchen muss vor Gebrauch gut geschüttelt werden.

! Gefahrenhinweis

Bitte sorgen Sie bei der Verarbeitung von Nacera® Blue X für ihre persönliche Schutzausrüstung, insbesondere Schutzbrille! Die Flüssigkeit ist nicht zum Verzehr geeignet. Sie darf nicht über den Hausmüll entsorgt werden oder in die Kanalisation gelangen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

i Sicherheitshinweise

Lesen Sie die Gebrauchsanweisung aufmerksam durch, bevor Sie beginnen mit Nacera® Blue X zu arbeiten. Sie enthält wichtige Informationen, die zur fehlerfreien Verarbeitung und zur Sicherheit der Patienten, als auch Anwender notwendig sind. Die Flüssigkeit Nacera® Blue X wird nach höchsten Qualitätsstandards gefertigt und geprüft.

Um diese Qualität auch während der Weiterverarbeitung zu gewährleisten, müssen die hier beschriebenen Verfahren unbedingt eingehalten werden.



Indikation

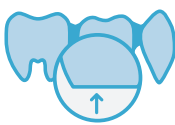
Nacera® Blue X ist nur für die Verarbeitung mit den Produkten des Nacera® Pearl Systems zulässig. Die Flüssigkeit dient der lokalen Erhöhung der Transluzenz im Inzisal- oder Okklusalbereich. Ziel ist es einen natürlichen Schmelz- und Farbverlauf nachzubilden.



Kontraindikation

Nacera® Blue X ist kontraindiziert bei Bruxismus. Es dürfen keine Brücken mit mehr als 3 Gliedern, statisch besonders belastete Kronen, Konstruktionen und Bereiche wie z.B. Brückenverbinder, Implantataufbauten und Stege mit Nacera® Blue X behandelt werden.

Nacera® Blue X ist ausschließlich für die Verwendung mit Nacera® Pearl Produkten geprüft und zugelassen. Darüber hinaus gelten die Hinweise der Gebrauchsanweisung von Nacera® Pearl.

MAX. 3 EINHEITEN			NUR AUSSENSEITE			KEINE VERBINDER		
								
NICHT BASAL			SUPRA-KONSTRUKTION			KEIN ABUTMENT		
								

Anwendung



Anwendung

Nacera® Blue X wird auf die vestibulären, inzisalen bzw. okklusalen Bereiche der Restauration aufgetragen. Zur kontaminierungsfreien Behandlung des vorgesinterten Materials darf nur ein **metallfreier Pinsel** verwendet werden.

Das Fläschchen muss vor Gebrauch gut geschüttelt werden.

Bitte entnehmen Sie nur die zu verwendende Menge an Flüssigkeit in ein weiteres Gefäß, sodass keine Stäube o. Ä. den Inhalt des Fläschchens für spätere Anwendungen verunreinigen. Gießen Sie die Flüssigkeit nicht zurück in das **Nacera® Blue X** Fläschchen. Folgende Bearbeitungsschritte 1 bis 4 sind durchzuführen, Beispiel anhand eines Frontzahnes:

1. **Nacera® Blue X** wird ab der Hälfte von Zervikal zu Inzisal gestrichen.
2. **Nacera® Blue X** wird im oberen Drittel von Zervikal zu Inzisal gestrichen
3. **Nacera® Blue X** wird im oberen Viertel in Richtung der Inzisalkante aufgetragen.
4. Identisch mit Schritt 3.

Die blau-grüne Indikatorflüssigkeit macht dabei die Kontrolle der Färbintensität besonders leicht.



Bitte trocknen Sie die mit **Nacera® Blue X** behandelten Kronen für 15 Minuten vor dem Sintern.

Sintern Sie mit **Nacera® Blue X** behandelte Kronen und Brücken stets mit den entsprechenden **Nacera® Pearl** Sinterzyklen.



Für den ausführlichen Sinter-Guide scannen Sie bitte den QR-Code oder schauen Sie auf unsere Webseite unter: doceram-medical.com/de/downloads/



Sie nutzen lieber ein Video-Tutorial? Dann schauen Sie doch auf unseren YouTube-Channel vorbei!
www.youtube.com - Einfach nach "Nacera Inside" suchen oder den QR-Code scannen.



Pinseltechnik Frontzahn

START	0			1	 1/2		2	 1/3
	3	 1/4		4	 1/4	TROCKNEN	5	15 Min.
Wichtig: Nur metallfreie Pinsel benutzen! Flasche vor Gebrauch gut schütteln!								